Extragenitales Material	Abnahme	Abstriche fix./unfix.	Nativmaterial (Einsendegefäß; Fixierung: z.B. Alkohol)
Ascites	Punktat	+/+	
BAL = BSK	Abstrich	+/+	
Bronchus	Abstrich	+	
Bronchus	Fein.Punktion	+	
Bursa (Schleimbeutel)	Punktat	+/+	
Douglas	Punktat, Ergüsse	+/+	
Ductus choledochus	Abstrich	+	
Ductus hepaticus	Abstrich	+	
Abszess	Punktat	+/+	
Gelenk-Knie (Hydrops)	Punktat, Ergüsse	+/+	
Galle	Abstrich	+	Jedes Nativmaterial muss in
Herzbeutel	Punktion, Ergüsse	+/+	einem unbeschichteten
Knochen	F-Punktat	+	Einsendegefäß (NICHT
Leber	F-Punktat	+	SPRITZEN!) in adäquater Menge
Liquor	Punktat	+/+	(1-10 ml) so schnell wie möglich
Lunge	F-Punktat	+	nach Entnahme an das
Lymphknoten	F-Punktat	+/+	Zytologische Institut gebracht
Magen	Abstrich	+/+	werden. Sollte es zu
Muskel	Punktat	+/+	Verzögerungen im Versand
Mamma	F-Punktat	+	kommen ist die Probe gekühlt
Mammasekret	Abstrich	+/+	aufzubewahren.
Niere	F-Punktat	+	
Ösophagus	Abstrich	+	Das Verwenden von anderen –
Ovar	F-Punktat	+/+	beschichteten Einsendegefäßen
Pankreas	F-Punktat	+/+	ist vom Einsender am
Peritoneum	Punktat, Ergüsse	+/+	Einsendeformular zu vermerken.
Pleura	Punktat, Ergüsse	+/+	
Pleurastanze	F-Punktat	+/+	
Rektum/Anus	Abstrich	+	
Speicheldrüse/Glandula	F-Punktat	+/+	
parotis			
Struma	F-Punktat	+/+	
Sputum	Abstrich	+	
Serom	F-Punktat	+	
Zyste	Punktat, Ergüsse	+/+	
Harn	Abstrich	+	
Harn	Lavage	+	Unbeschichtetes Einsendegefäß; Probe 1:2 mit 50% Alkohol verdünnt